



### COMPONENTES DE LA CAMA

- A Cabecero
- B Lecho de rejilla
- C Barandillas de tubo
- D Piecero
- E Discos de freno
- F Hidráulico de elevación de los tramos del lecho
- G Ruedas
- H Husillos

### LIMPIEZA

Limpieza y desinfección diaria con agua jabonosa:

- Barandillas.
- Cabecero.
- Piecero.

Limpieza y desinfección después de la salida de un paciente o antes de un traslado:

- Lecho de la cama.
- Chasis de la cama.




Limpieza y desinfección a fondo cada dos meses:

- Soporte y elevación de la cama.

### MANTENIMIENTO

Comprobar siempre el estado correcto de:

- Cabeceros y pieceros.
- Barandillas.
- Ruedas y mecanismos de frenado.

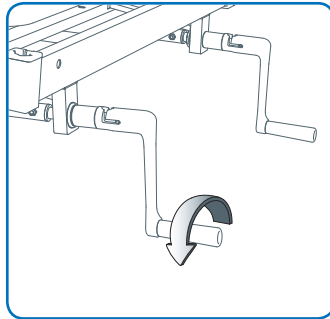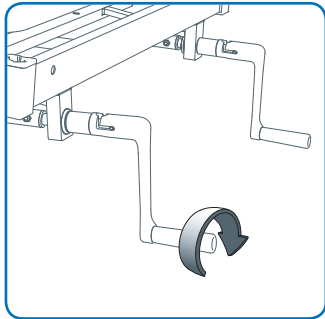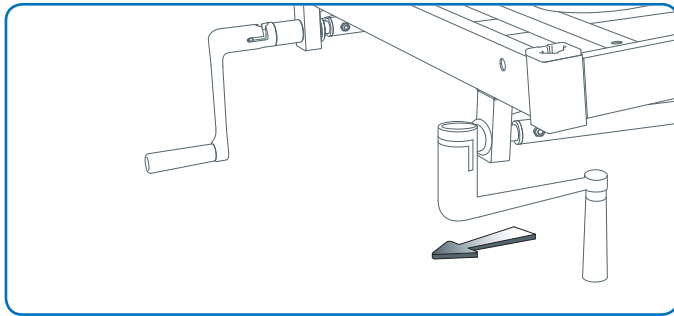

### ELEVACIÓN Y DESCENSO DE LOS TRAMOS DEL LECHO

Colocación de la manivela en su posición de uso:




- Tirar de la manivela hacia el exterior de la cama.
- Orientarla hasta su posición de uso.
- Empujar la manivela hasta su posición correcta.

Tramo del tronco:

- Para la elevación del módulo de tronco, girar en el sentido de las agujas del reloj la manivela de la izquierda.
- Para descender el módulo de tronco, proceder en sentido contrario al de las agujas del reloj.

Tramo de las piernas:

- Para la elevación del módulo de las piernas, girar en el sentido de las agujas del reloj la manivela de la derecha.
- Para descender el módulo de las piernas, proceder en sentido contrario al de las agujas del reloj.

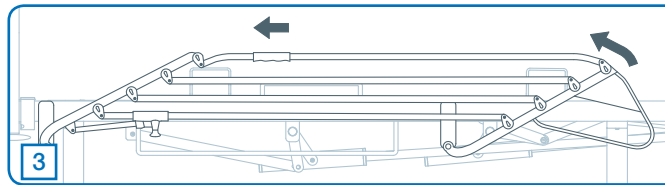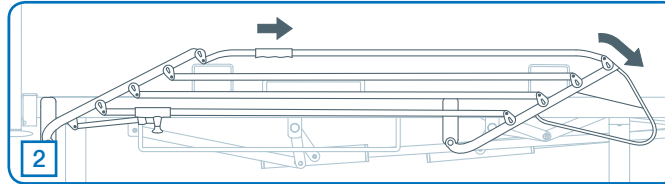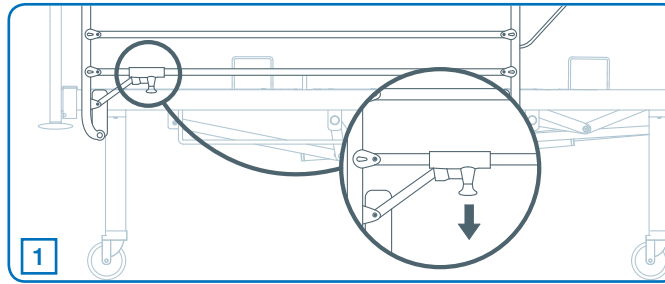


### BARANDILLAS

Descenso de la barandilla

- Desbloquear la maneta inferior de la barandilla tirando de ella hacia abajo (1).
- Plegar la barandilla (2) hacia los pies acompañándola hasta su posición más baja donde quede bloqueada.
- Una vez que la barandilla se ha plegado se puede empujar hacia adentro para recogerlas.


Elevación de la barandilla

- Sacar las barandillas que permanecen escamoteadas tirando de ellas hacia afuera.
- Tirar de la barandilla hacia el cabecero de la cama hasta que se oiga un "click" de la maneta inferior, momento en el cual la barandilla quedará fijada en su posición más elevada (3).

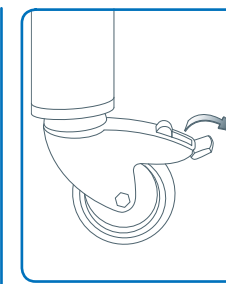

### FRENO INDIVIDUAL

Para activar el frenado basta con pisar la palanca de freno que dispone cada una de las ruedas, mientras que para desactivarlo habrá que levantar dicha palanca.


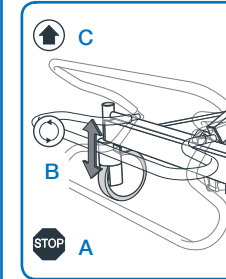


### PEDAL MULTIFUNCIÓN (SÓLO EASO CON CARRO)

- Frenado de la cama (A).
- Desplazamiento de la cama (B).
- Accionamiento de la rueda direccional (C).

### ELEVACIÓN Y DESCENSO DE LA CAMA (SÓLO EASO CON CARRO)

Pisar repetidamente el pedal verde hasta dejar la cama a la altura deseada, para descender hay que pisar el pedal rojo.

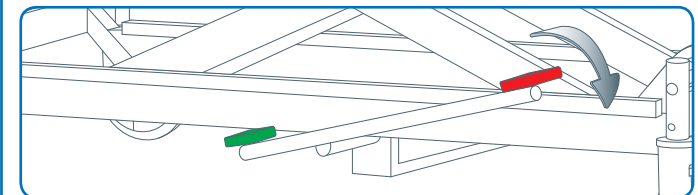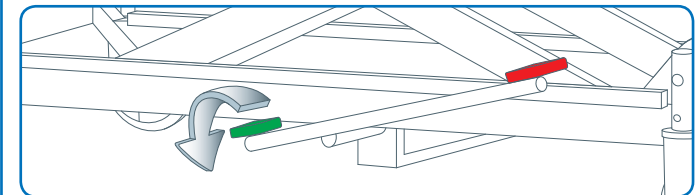

### ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- *sEn los movimientos de elevación y descenso de las partes móviles del lecho, con el resto de partes de la cama o los accesorios, se deberá comprobar que no se encuentra ningún obstáculo entre estos.*

