

COMPONENTES DE LA CAMA

A	Cabecero extraíble	H	Barandillas de extremidades
B	Control de membranas en las barandillas	I	Ruedas Ø150 mm.
C	Indicador de inclinación respaldo	J	Desbloqueo de cabeceros y pieceros
D	Indicador de inclinación Trend y Antitrend	K	Pedal de frenado
E	Barandillas de respaldo	L	Control de membrana en el piecero
F	Lecho de HPL	M	Discos de protección
G	Piecero extraíble	N	Maneta CPR de emergencia

OTRAS FUNCIONES

Barandillas (1):


- Elevación: Tirar de la barandilla hacia arriba hasta que quede inmobilizada en su posición más alta.
- Descenso: Tirar del asa que se encuentra debajo de la barandilla hacia afuera. La barandilla bajará automáticamente.

Pedales de freno (3):


- Freno: Pedal en posición baja.
- Giro libre: Pedal en posición horizontal.
- Direccional: Pedal en posición elevada.

CPR de emergencia (2):



- Accionar cualquiera de las dos palancas situadas debajo del módulo del respaldo, acompañándolo a su vez durante el descenso.

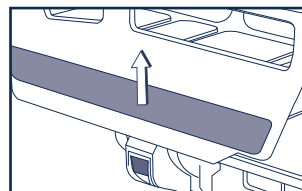


Elevar barandillas

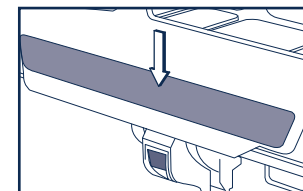


Descender barandillas

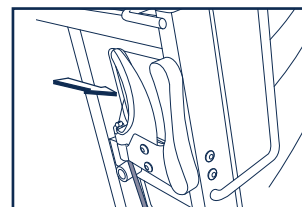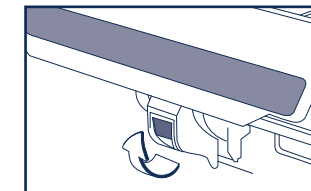


CPR de emergencia

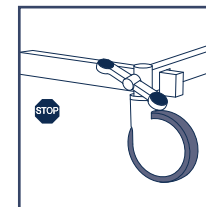

Freno

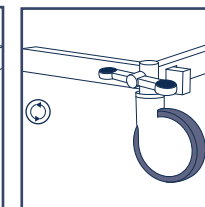

Movimiento libre

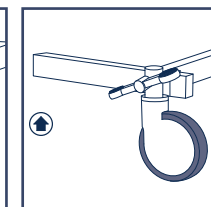

Direccional

LIMPIEZA

Limpieza y desinfección diaria con agua jabonosa:

- Barandillas, cabecero, piecero.

Limpieza y desinfección después de la salida de un paciente o antes de un traslado:

- Lecho de la cama, chasis de la cama.

Limpieza y desinfección a fondo cada dos meses:

- Soporte y elevación de la cama.


MANTENIMIENTO

Comprobar siempre el estado correcto de:


- Cableado eléctrico.
- Ruedas.
- Mecanismos de frenado.




MANDOS

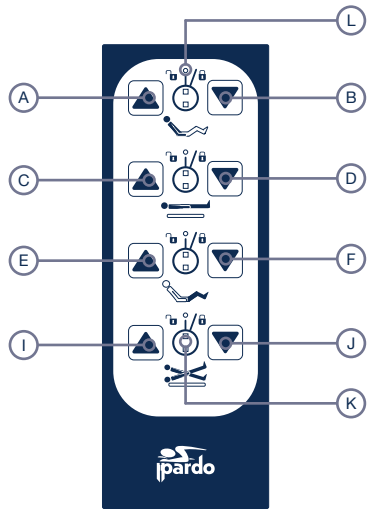


Mando de paciente con bloqueos

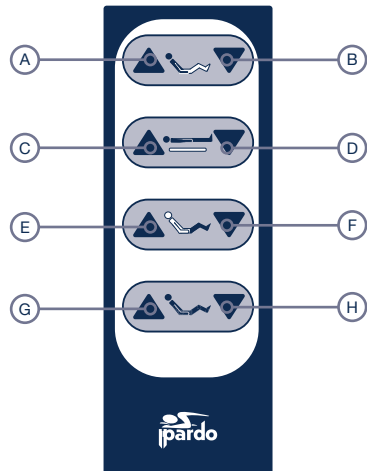

Mando de paciente

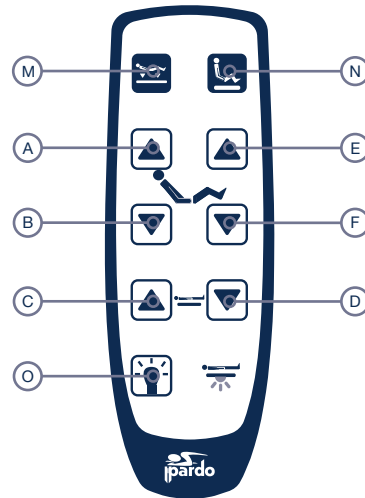


Mando de paciente con luz

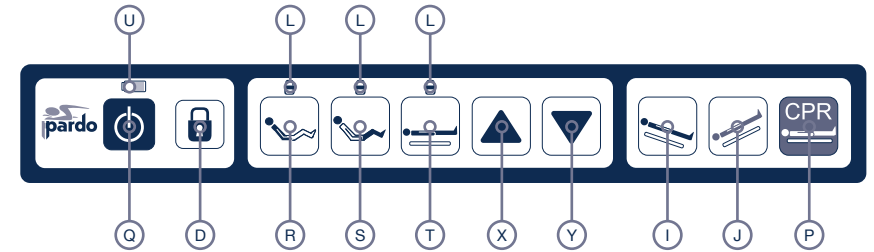


Mando de membrana en piecero para enfermería

INSTRUCCIONES DE USO

A	Subir respaldo	N	Posición Silla cardíaca
B	Bajar respaldo	O	Luz
C	Subir lecho	P	CPR de emergencia
D	Bajar lecho	Q	Botón ON (activación de las membranas)
E	Subir piernas	R	Seleccionar respaldo
F	Bajar piernas	S	Seleccionar extremidades
G	Subir respaldo y piernas simultáneamente (<i>autocontour</i>)	T	Seleccionar elevación
H	Bajar respaldo y piernas simultáneamente (<i>autocontour</i>)	U	Indicador de batería
I	Antitrend	V	Posición exploración (altura máxima)
J	Trend	W	Posición Trend de emergencia
K	Cerradura para introducir la llave de bloqueos	X	Subir
L	Led indicador de bloqueo de movimientos	Y	Bajar
M	Posición Flat (Bajada simultánea de los cuerpos)		

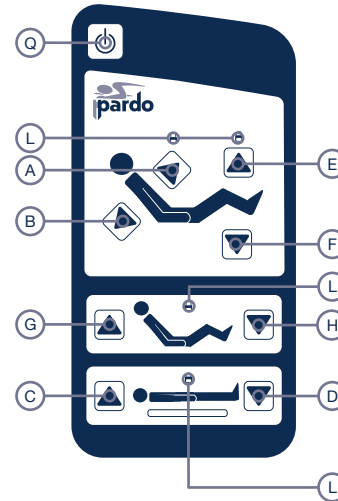

Mando de membranas

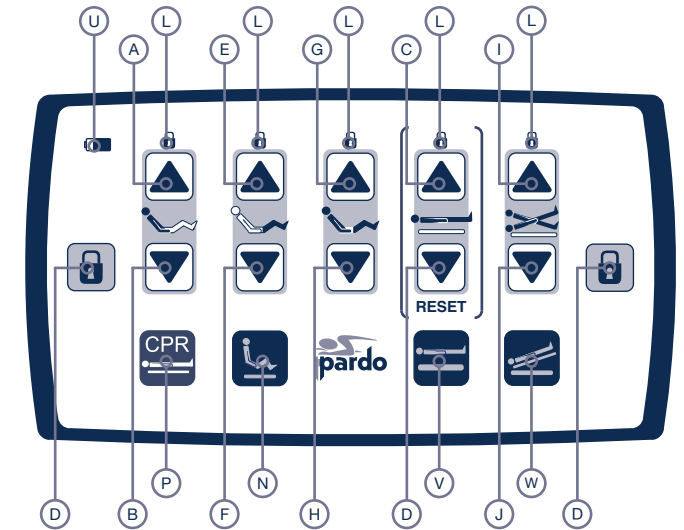

Mando de enfermería por cable ACO



ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- En los movimientos de elevación y descenso de las partes móviles del lecho, con el resto de partes de la cama o los accesorios, se deberá comprobar que no se encuentra ningún obstáculo entre estos.
- La duración máxima de la maniobra continua no debe exceder los 2 minutos de lo contrario se pueden causar daños al equipo.
- El movimiento Trendelenburg y Antitrendelenburg debe realizarse siempre bajo supervisión médica.
- No utilizar las manetas del accionamiento bilateral CPR para elevar el respaldo de la cama en ningún caso ya que podría producirse un fallo en el motor de elevación.

