

COMPONENTES DE LA CAMA

A	Cabecero curvo extraíble	H	Husillo de respaldo
B	Barandillas de respaldo	I	Ruedas integrales Ø150 mm.
C	Barandillas de extremidades	J	Pedal de frenado
D	Lecho de HPL	L	Pedal de elevación
E	Lecho de chapa fijo	M	Discos de protección
F	Picero curvo extraíble	P	Palanca trend / antitrend
G	Husillo de extremidades		

LIMPIEZA

Limpieza y desinfección diaria con agua jabonosa:

- Barandillas, cabecero, picero.

Limpieza y desinfección después de la salida de un paciente o antes de un traslado:

- Lecho de la cama, chasis de la cama.

Limpieza y desinfección a fondo cada dos meses:

- Soporte y elevación de la cama.

MANTENIMIENTO

Comprobar siempre el estado correcto de:

- Ruedas.
- Mecanismos de frenado.
- Componentes mecánicos de accionamiento de cuerpos y lechos.




MOVIMIENTOS DE LOS CUERPOS

Desbloquear manivela:


- Tirar de la manivela hacia el exterior de la cama
- Orientarla hasta su posición de uso.
- Empujar la manivela hasta su posición correcta.

Articulación de los cuerpos:


- Elevación: Girar la manivela en el sentido de las agujas del reloj.
- Descenso: Girar la manivela en el sentido contrario de las agujas del reloj.

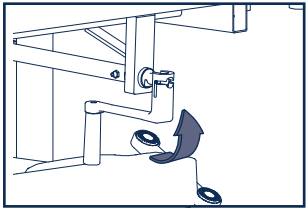


Desbloquear manetas

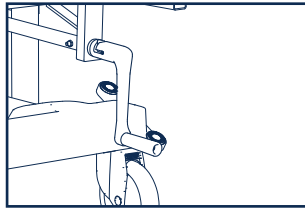

Posición de uso

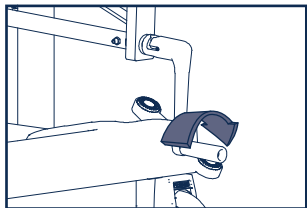

Elevación de los cuerpos

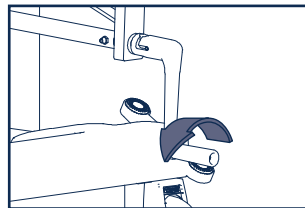


Descenso de los cuerpos

MOVIMIENTO TREDELENBURG / ANTI TREDELENBURG

Inclinación trendelenburg:

- Accionar la palanca situada a los pies.
- Sujetando el bastidor inclinar el piecero respecto al cabecero.

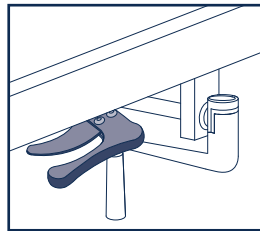

Palanca Trend / Antitrend


Inclinación antitrendelenburg:

- Accionar la palanca situada a los pies.
- Sujetando el bastidor inclinar el cabecero respecto al piecero.


OTRAS FUNCIONES

Barandillas:


- Elevación: Tirar de la barandilla hacia arriba hasta que quede inmovilizada en su posición más alta.
- Descenso: Tirar del asa que se encuentra debajo de la barandilla hacia afuera. La barandilla bajará automáticamente.

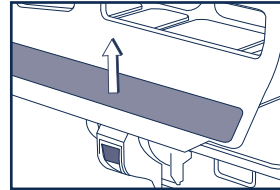

Elevar barandillas

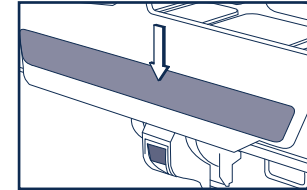


Descender barandillas

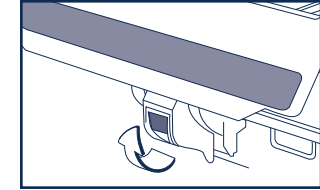


Pedales de freno:


- Freno: Pedal en posición baja.
- Giro libre: Pedal en posición horizontal.
- Direccional: Pedal en posición elevada.

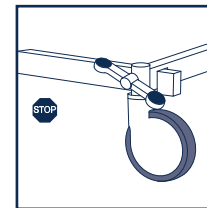

Freno

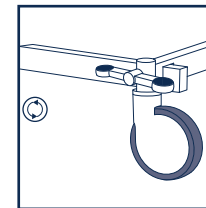

Movimiento libre

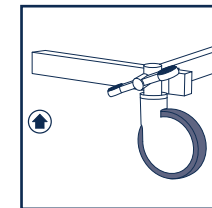


Direccional

REGULACIÓN DE LA ALTURA

Elevar el lecho:


- Para activar la elevación del lecho pisar repetidamente el pedal verde, hasta dejar la cama a la altura deseada.

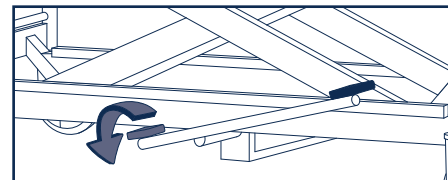

Elevar lecho

Descender el lecho:

- Para descender pisar el pedal rojo.
- Si se mantiene pisado ese pedal rojo la cama descenderá hasta su posición mínima.

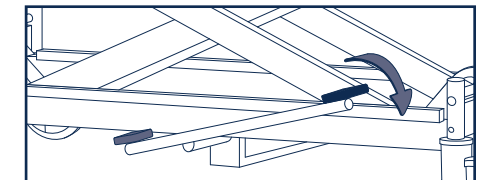

Descender lecho



ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- En los movimientos de elevación y descenso de las partes móviles del lecho, con el resto de partes de la cama o los accesorios, se deberá comprobar que no se encuentra ningún obstáculo entre estos.
- El movimiento Trendelenburg y Antitrendelenburg debe realizarse siempre bajo supervisión médica.
- Existe riesgo de tropiezo o caída si las manivelas se encuentran en su posición de uso. Recuerde escamotear la manivela después de su uso.

