


## FICHA DE CONSULTA RÁPIDA

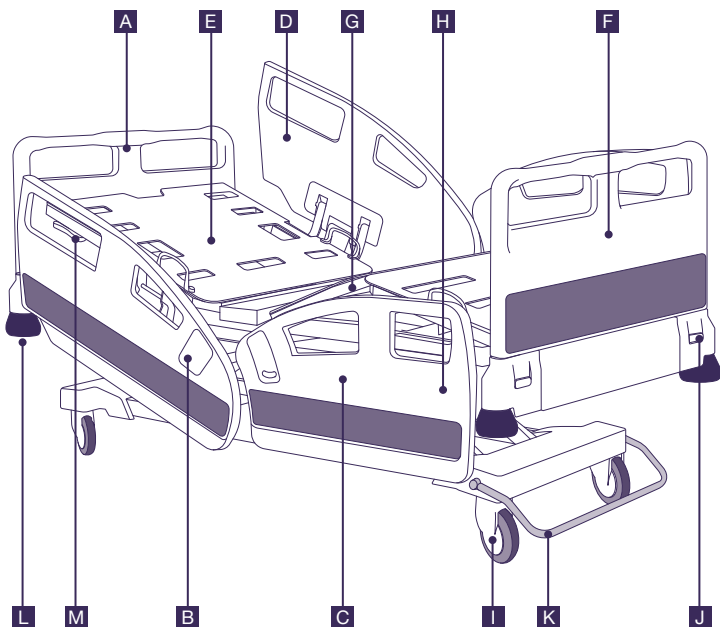

### COMPONENTES DE LA CAMA

A	Cabecero curvo extraíble	H	Barandillas de extremidades
B	Indicador de inclinación respaldo	I	Ruedas integrales Ø15 cm.
C	Indicador de inclinación Trend y Antitrend	J	Desbloqueo de cabeceros y pieceros
D	Barandillas de respaldo	K	Pedal de frenado
E	Lecho de HPL	L	Discos de protección
F	Pieceros curvos extraíbles	M	Maneta CPR de emergencia
G	Lecho de chapa fija		

### OTRAS FUNCIONES

#### Barandillas (1):


- Elevación: Tirar de la barandilla hacia arriba hasta que quede inmobilizada en su posición más alta.
- Descenso: Tirar del asa que se encuentra debajo de la barandilla hacia afuera. La barandilla bajará automáticamente.

#### CPR de emergencia (2):


- Accionar cualquiera de las dos palancas situadas debajo del módulo del respaldo, acompañándolo a su vez durante el descenso.

#### Pedal de freno (3):



- Freno: Pedal en posición baja.
- Giro libre: Pedal en posición horizontal.
- Direccional o 5ª rueda: Pedal en posición elevada.

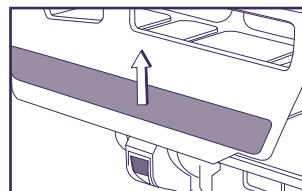


Elevar barandillas

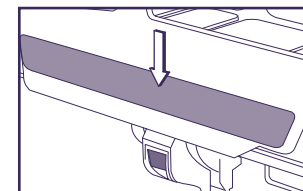


Descender barandillas

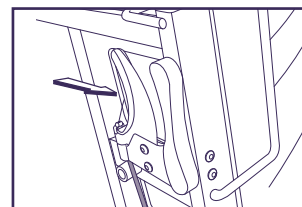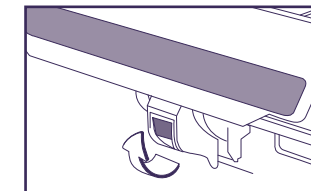


CPR de emergencia

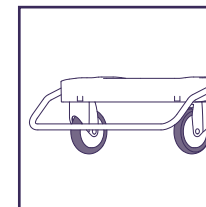

Freno

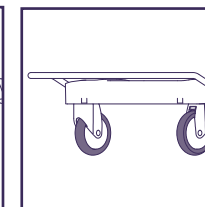

Movimiento libre

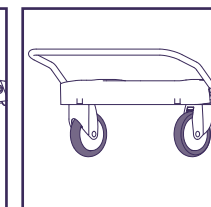

Direccional o 5ª rueda

### LIMPIEZA

Limpieza y desinfección diaria con soluciones de cloro con una concentración mínima de 1000 mg/l:

- Barandillas, cabecero, piecero.

Limpieza y desinfección después de la salida de un paciente o antes de un traslado:

- Lecho de la cama, chasis de la cama.

Limpieza y desinfección a fondo cada dos meses:

- Soporte y elevación de la cama.

### MANTENIMIENTO


Comprobar siempre el estado correcto de:

- Cableado eléctrico.
- Ruedas.
- Mecanismos de frenado.




## INSTRUCCIONES DE USO


A	Subir respaldo	H	Bajar cuerpos simultáneamente ( <i>autocontour</i> )	O	Luz bajo cama
B	Bajar respaldo	I	Antitrend	P	CPR de emergencia
C	Subir lecho	J	Trend	Q	Botón ON (activación de membranas)
D	Bajar lecho	K	Bloqueo de movimientos	W	Indicador de batería
E	Subir piernas	L	Led indicador de bloqueo de movimientos	X	Posición exploración (máxima altura)
F	Bajar piernas	M	Posición Flat (bajada simultánea de cuerpos)	Y	Posición Trend de emergencia
G	Subir cuerpos simultáneamente ( <i>autocontour</i> )	N	Posición silla cardíaca	Z	Llamada a enfermería

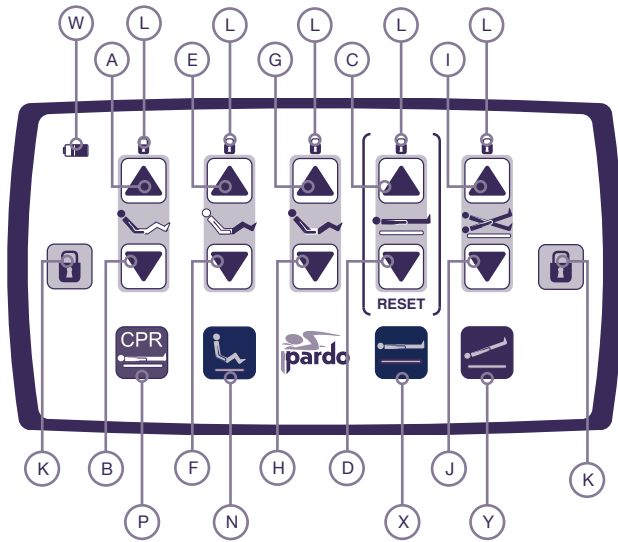


Mando de enfermería por cable

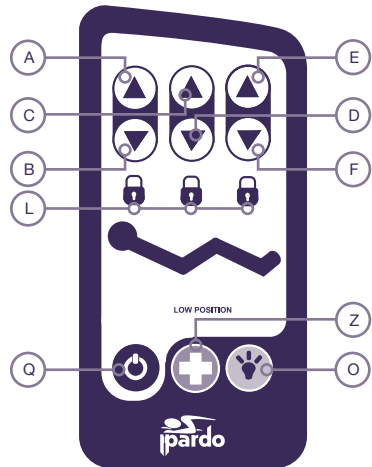


Membranas sin botón de bloqueo

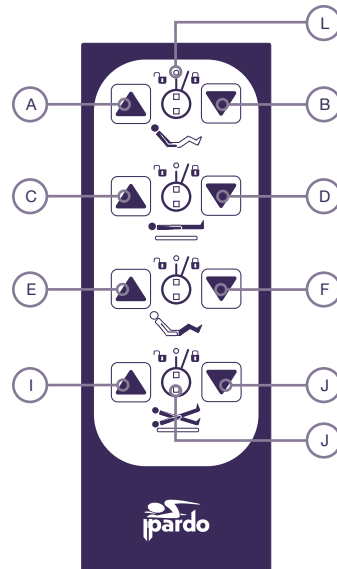

Mando de paciente con bloqueos

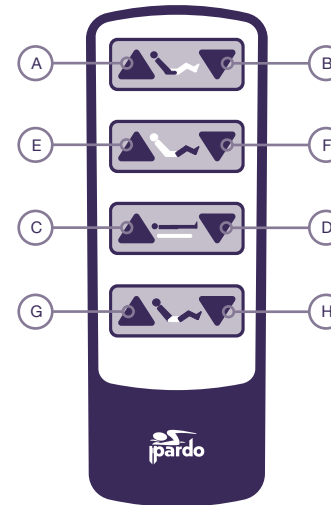

Mando de paciente

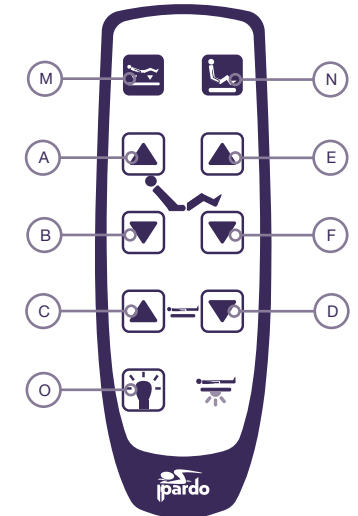

Mando de paciente con luz



### ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- En los movimientos de elevación y descenso de las partes móviles del lecho, con el resto de partes de la cama o los accesorios, se deberá comprobar que no se encuentra ningún obstáculo entre estos.
- La duración máxima de la maniobra continua no debe exceder los 2 minutos de lo contrario se pueden causar daños al equipo.
- El movimiento Trendelenburg y Antitrendelenburg debe realizarse siempre bajo supervisión médica.
- Cuando la cama se encuentre en su posición extendida no sentarse ni apoyarse en el extremo de los pies de la cama ya que podría producirse el volcado de la cama.
- No utilizar las manetas del accionamiento bilateral CPR para elevar el respaldo de la cama en ningún caso ya que podría producirse un fallo en el motor de elevación.

